


INSTRUKCJA

DESKA ORTOPEDYCZNA

IRON DUCK

PEDI AIR ALIGN

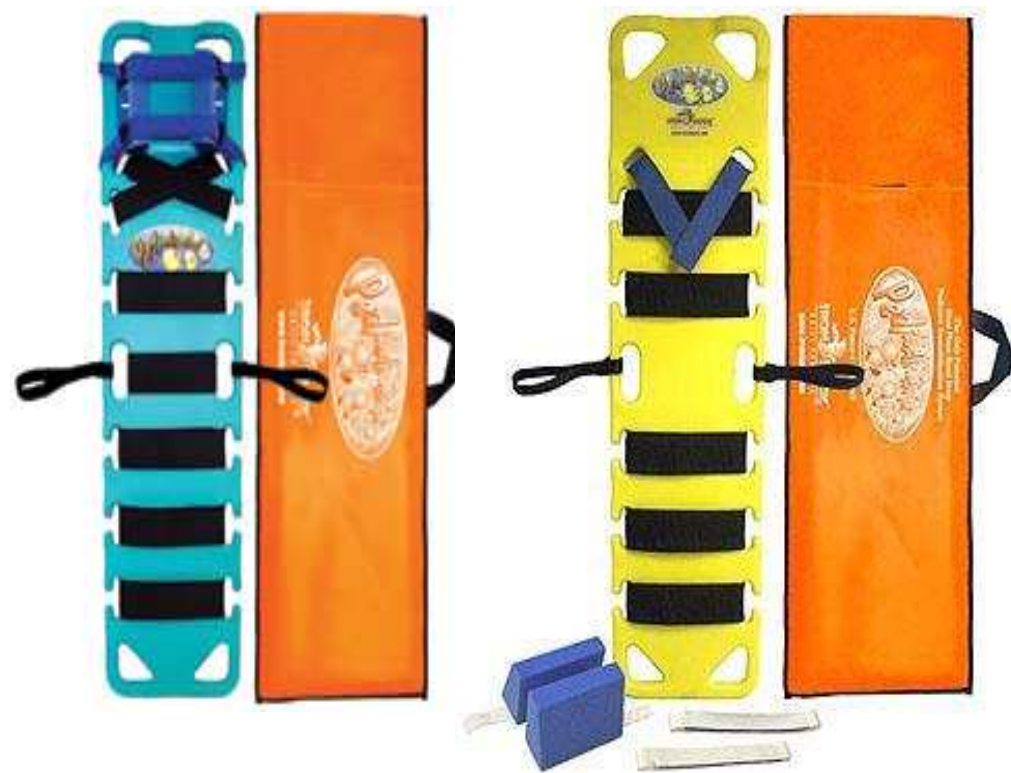

ver.12-09-2007r.

WPROWADZENIE:

Deska pediatria PEDI jest przeznaczona do transportu dzieci do 120cm wzrostu, z podejrzeniem o urazy głowy lub kręgosłupa. Służy do unieruchomienia, jak i transportu małych pacjentów z miejsca wypadku poprzez kolejne etapy ewakuacji.

Podstawową zaletą deski pediatria PEDI jest wielorakość zastosowania, może służyć jako unieruchomienie dla pacjentów z wypadków samochodowych, wypadkach w wodzie i wielu innych. Unieruchomienie jest przystosowane do unieruchomienia głowy, za pomocą stabilizatora głowy.


Deska jest prześwietlana dla promieni X.

Komplet jest dostępny w przenośnej torbie transportowej.

Wymiary: 122cm x 30cm x 4,5cm.

ZASADY UŻYTKOWANIA:


Dla ułatwienia akcji ratowniczej posiada kolorowe oznaczenia pasów. Zasady użytkowania podobne jak w przypadku deski ortopedycznej ze stabilizatorem głowy. Przy tej stabilizacji mamy do czynienia z pasami (zapinanymi na rzepy) na nogi, na tułów, klatkę piersiową i ramiona. Po wsunięciu pod dziecko unieruchomienia, zapinamy dziecko pasami, dopasowując indywidualnie rozmiar, a następnie zakładamy klocki dokładnie tak, jak przy stabilizatorze głowy.

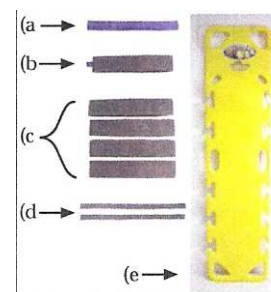MOCOWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA:**KROK 1:**

Ułóż wszystkie części:


- (a) pas niebieskie – ramienny;
- (b) pas czarny – piersiowy;
- (c) 4 pasy czarne – na ciało;
- (d) 2 pasy czarne – na nadgarstki;
- (e) deska PEDI;

KROK 2:

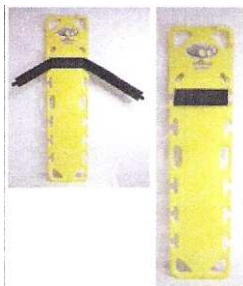


Założ pasy piersiowe (czarne) poniżej części, gdzie będzie założony stabilizator.

KROK 3:

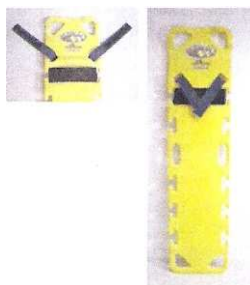

Założ pasy ramienne (niebieskie) powyżej piersiowych, przesuwając je pod deską.

KROK 4:

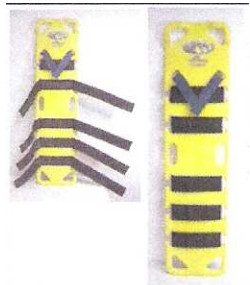

Założ cztery pasy do ciała, omijając miejsce, gdzie znajdują się uchwyty dla ratowników.

KROK 5:



Zamocuj pasy służące jako uchwyty dla ratowników.


UNIERUCHOMIENIE CIAŁA:

KROK 1:



Ułóż bardzo ostrożnie pacjenta na deskę, tak aby głowa spoczywała w części przedniej. Pamiętaj o podstawowych zasadach pierwszej pomocy.

KROK 2:

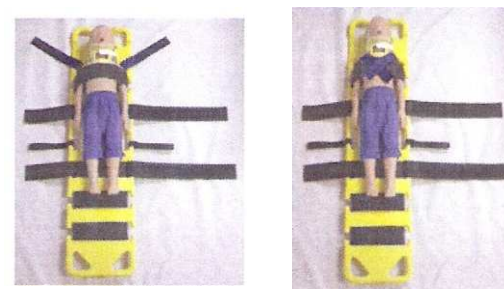

Zabezpiecz pacjenta pasami piersiowymi.


KROK 3:



Zapnij pacjenta pasami bezpieczeństwa wzdłuż całego ciała.

UNIRUCHOMIENIE GŁOWY:

KROK 1:

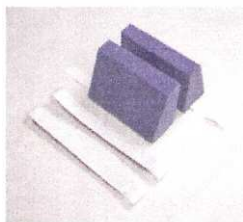

Rozłóż stabilizator głowy na:

- 2 klocki do stabilizacji;
- 2 pasy do umocowania stabilizatora;

KROK 2:



Za pomocą pasów klejących, przymocuj klocki stabilizujące do deski.

KROK 3:



Zwróć uwagę, czy jest właściwie zapięty.

KROK 4:



Za pomocą pasów rzepowych do umocowania stabilizatora, zabezpiecz głowę pacjenta, czoło i podbródek. Pasy stabilizujące głowę mocuje się do spodniej części deski.

KROK 5:



Sprawdź, czy pacjent jest właściwie zabezpieczony do transportu.

Powyższa instrukcja została przetłumaczona przez firmę Medline Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, w oparciu o materiały dostarczone przez producenta sprzętu. Producent oraz firma Medline zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji naszych instrukcji.

Kopiowanie i powielanie niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

DYSTRYBUTOR:

MEDLINE® sp. z o.o.
65-410 Zielona Góra
ul. Fabryczna 17
tel. (068)3207524
fax. (068)3257301

Email: medline@medline.pl

Warunki udzielonej gwarancji:

1. **Podstawą uznania gwarancji jest zapoznanie się z instrukcją obsługi aparatu/ sprzętu i postępowania zgodnego z zaleceniami producenta.**
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 12 miesięcy.
3. Wady sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela firmę : MEDLINE Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-410 przy ul. Fabrycznej 17, telefonicznie: (068)3207524 lub faksem (068)3257301. Serwis tel. (068)4547220 lub serwis@medline.pl
4. Sprzedany sprzęt nie podlega odpowiedzialności gwarancyjnej gwaranta w przypadku :
 - a.) niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez użytkownika, a w szczególności z pominięciem przewidzianych przeglądów konserwacyjnych.
 - b.) używanie go niezgodnie z przeznaczeniem, jak i dołączoną instrukcją.
 - c.) dokonywanie jakichkolwiek zmian, przeróbek lub napraw, jak i zmian w zewnętrznym wyglądzie sprzętu lub jego numerze seryjnym, przez nieuprawniony do tego podmiot.
 - d.) w przypadku uszkodzeń mechanicznych i używania nieoryginalnych części zużywalnych.
 - e.) w wyniku innych zdarzeń leżących po stronie użytkownika, a nie w samym sprzęcie.
5. W przypadku stwierdzenia, iż zlecona naprawa nie może zostać potraktowana jako gwarancyjna, koszt ewentualnej naprawy, ponosi w całości zgłaszający.
6. Sprzęt zgłoszony do naprawy gwarancyjnej winien być dostarczany do naprawy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym wyposażeniem.
7. **Gwarancją nie jest objęta wymiana zużywalnych części na nowe, wynikająca z normalnej eksploatacji sprzętu oraz okresowe regulacje konserwacyjne.**
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia sprzętu do naprawy do dnia dostarczenia sprzętu do użytkownika.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jak i utracą korzyść w okresie dokonywania naprawy.
10. W zakresie sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami uprawnienia wynikające z rękojmi, podlegają wyłączeniu.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku jakichkolwiek sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia, będzie sąd właściwy dla gwaranta.
12. Kupujący przyjmując gwarancję oświadcza, że zapoznał się ze sprzętem i warunkami udzielonej gwarancji.
13. **Przeglądy okresowe są odpłatne.**

Oddano do użytkowania sprzęt sprawny technicznie

.....
Podpis i pieczętka

www.medline.pl

DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO